


RESPENDIAL

RESPENDIAL Radial Artery Compression Device Instruction for use



پس از جراحی :
شیت را به اندازه ۳-۲ سانتی متر بیرون بکشید. مطمئن شوید که علائم وازواسپاسم وجود ندارد.

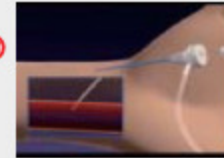

بالشتک را روی محل سوراخ فشار دهید.
جهت وسیله برای استفاده در مچ چپ یا راست یکسان نیست. انتهای بند پارچه ای چسبی در زمان فیکس شدن وسیله باید در سمتی باشد که انگشت کوچک وجود دارد. برای جلوگیری از چسبندگی پوست یا لغزش ناشی از تعریق در تابستان یک گاز استریل زیر بالشتک قرار دهید.



باند پارچه ای چسبی را از پلیت روی مچ رد کنید و بکشید. اطمینان حاصل کنید که بالای نشانگر سفید در همان سطح کلاهک چرخان تراز می شود. بند پارچه ای چسبی را ثابت کنید. فشار در حال حاضر حدود 90mmHg است.



کلاهک چرخان را در جهت عقربه های ساعت تا بالای دومین نشانگر سبز رنگ بچرخانید. فشار در حال حاضر حدود 155mmHg است. رابطه بین فشار و نشانگر به صورت زیر است:

155mmHg-205mmHg = **نشانگر سبز**
195mmHg-295mmHg = **نشانگر قرمز**



هر دو انتهای پلیت روی مچ را فشار دهید تا وسط آن به سمت بالا متمایل شود. شیت را بیرون بکشید و سپس بلافاصله صفحه ی روی مچ را رها کنید تا این صفحه به صورت محکم در تماس با پوست قرار گیرد. کلاهک چرخان را برای اطمینان از هموستاز و ضربان نبض پایدار به درستی تنظیم کنید.



- اگر خونریزی آشکار وجود دارد کلاهک چرخان را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا خونریزی متوقف شود.
- اگر بیمار احساس بی حسی یا درد می کند کلاهک چرخان را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید اما اطمینان حاصل کنید که خونریزی آشکاری وجود نداشته باشد.
- پس از جراحی فوق اطمینان حاصل کنید شریان رادیال و شریان اولنار نبض دارند.

مدت زمان هموستاز برای بیماران مختلف نامشخص است و بستگی به وضعیت فیزیکی بیماران حجم پیاپی تزریق شده و قطر شیت دارد.

با توجه به وضعیت بالینی بیمار، پس از یک دوره مناسب فشار باید آزاد شود. از لحظه ای که تصمیم به آزاد کردن وسیله از دست می شود، کلاهک چرخان را به اندازه نیم دایره در جهت خلاف عقربه های ساعت هر ۴۵ الی ۶۰ دقیقه بچرخانید. اگر خونریزی وجود دارد کلاهک چرخان را دوباره تنظیم کنید تا از هموستاز مطمئن شوید.

پس از یک هموستاز موفقیت آمیز، وسیله را از بیمار جدا کنید و با استفاده از گاز استریل از نقطه سوراخ شده روی پوست به مدت حدوداً ۴ ساعت محافظت کنید.



ارجاع به راهنمای استفاده



تاریخ تولید



شماره کاتالوگ



فقط یکبار مصرف دوباره استفاده نکنید



لات نامبر



تاریخ انقضا



استریل با اتیلن اکساید




نماینده اروپایی



تولید کننده

وسیله بستن رگ بعد از آنژیورادیال برند رسپندیال

دستورالعمل استفاده

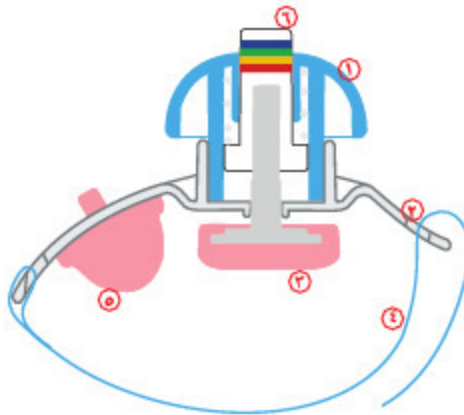

- ① كلاهك چرخان
- ② پليت روی مچ
- ③ بلشتك
- ④ باند پارچه ای چسبی
- ⑤ درپوش قفل كمکی
- ⑥ نشانگر سفید
(فشار مرجع ۱۰۰-۹۰ میلی متر جیوه)
- نشانگر آبی
(فشار مرجع ۱۸۵-۱۲۵ میلی متر جیوه)
- نشانگر سبز
(فشار مرجع ۲۰۵-۱۵۵ میلی متر جیوه)
- نشانگر زرد
(فشار مرجع ۲۱۵-۱۷۵ میلی متر جیوه)
- نشانگر قرمز
(فشار مرجع ۲۹۵-۱۹۵ میلی متر جیوه)

اندیکاسیون وسیله بستن رگ بعد از آنژیورادیال

این يك وسیله فشرده کننده برای كمك به هموستاز شریان رادیال پس از يك عمل ترانس رادیال است.

اقدامات احتیاطی و هشداري

- برای اجتناب از خراب شدن پیچ و هرز شدن آن كلاهك چرخان را بیش از حد نچرخانید.
- اگر بسته بندی وسیله آسیب دیده و یا کثیف شده است از آن استفاده نکنید. بعد از استفاده از وسیله آن را به طور صحیح و ایمن به عنوان يك وسیله پزشکی دور بیندازید.
- وسیله را با دستمال و یا مواد آلی حلال پاک نکنید. این مواد ممکن است به دستگاه آسیب برسانند.
- این وسیله با اتیلن اکساید استریل می شود. این وسیله فقط یکبار باید استفاده شود و نباید دوباره استریل و یا استفاده شود چرا که ممکن است موجب عفونت شود.
- اگر بسته بندی باز و یا آسیب دیده و یا کثیف باشد، لطفاً از وسیله استفاده نکنید.
- در زمان نگهداری از وسیله از قرار گرفتن آن در معرض آب، نور مستقیم خورشید، دمای شدید و یا رطوبت بالا جلوگیری نمایید.

- این وسیله برای بیمارانی است که دور مچ آنها بین ۱۰۰ تا ۲۴۰ میلی متری باشد.
- در حین عمل توصیه می شود که دستیاران پزشك مچ دست بیمار را صاف نگه دارند. همزمان بیمار نیز باید از فعالیت های شدید بازویی که در حال جراحی است اجتناب کند. پس از عمل، بیمار باید از خم شدن مچ دست به مدت ۲ ساعت خودداری کند. همچنین نباید مچ دست خود را به مدت ۴ تا ۶ ساعت حرکت دهد و آن را باید به موقعیت معلق نگه دارد.
- اگر فشار بالشتك خیلی زیاد باشد، ممکن است اتفاق نامطلوبی رخ دهد. بیمار ممکن است انسداد شریان، هماتوم زیر پوستی، خونریزی درد، یا بی حسی را تجربه کند که شدت آن بستگی به وضعیت بیمار دارد. اگر علائم بالا رخ داد لطفاً فرآیند بسته شدن رگ را چك کنید و كلاهك چرخان را بچرخانید تا فشار بالشتك تنظیم شود.
- اعتبار استریل: ۳ سال
- تاریخ انقضای روی بسته بندی درج شده است.
- این وسیله برای استفاده توسط يك پزشك مجرب یا كاركنان آموزش دیده كادر پزشکی طراحی شده است.
- این وسیله باید فوراً پس از باز کردن بسته بندی مورد استفاده قرار گیرد.

روش استفاده:

مراحل قبل از جراحی :

۱. نقطه سوراخ روی پوست را تمیز و استریل کنید و سپس آن را با يك تکه گاز استریل خشك کنید.

۲. بسته بندی را باز کرده و وسیله بستن رگ را بیرون بیاورید.

۳. بند پارچه ای چسبی را مطابق با اندازه دور مچ، تنظیم کنید.

برای مچ های باریك (دور مچ از ۱۰۰ میلی متر تا ۱۴۰ میلی متر)، درپوش قفل كمکی را بردارید و بند پارچه ای را از سوراخ آن عبور دهید و سپس آن را محكم کنید، مانند تصویر سمت چپ تنظیم کنید.

برای مچ های معمولی یا پهن تر (دور مچ از ۱۴۰ میلی متر تا ۲۴۰ میلی متر)، بدون تنظیم اضافی، مستقیماً از وسیله استفاده کنید.



- ① درپوش قفل كمکی را بردارید.
- ② مطابق تصویر، از سوراخ روی پليت، بند پارچه ای چسبی را بردارید و سپس آن را بکشید.